

Comfeel



Comfeel Hudpleje og tilbehør

- Barriere
- Beskyttelsesfilm
- Rens



Comfeel Hudpleje og tilbehør

Comfeel Barriere

Comfeel Barriere er en let hudlotion, der er ideel til at forebygge tør, irriteret og macereret hud. Den er udviklet specielt til at beskytte hud, som ofte er udsat for kropsssekreter som tarmindhold, urin og pus. **Comfeel Barriere**s indhold af paraffinolie og cyclomethicon (silikone) gør den vandafvisende og dermed modstandsdygtig over for kropsssekreter, samtidig med at den gør huden glat og smidig. Den bevarer desuden hudens naturlige pH.

Comfeel Barriere masseres grundigt ind i den rengjorte hud. Er huden væskende, duppes cremen forsigtigt på. Ved efterfølgende brug af en hæftende bandage, bør man nøjes med at smøre et tyndt lag på, lad det lufttørre ca. 5 minutter, hvorefter eventuelt overskydende creme fjernes med en blød serviet.



Comfeel Barriere er også særdeles velegnet som en almindelig håndcreme og kan således anvendes til mange forskellige formål.

Indholdsstoffer

Vand, paraffinum liquidum, protegin, cyclomethicone, glycerin, magnesium citrate, methylparaben, propylene glycol og propylparaben.

Comfeel Beskyttelsesfilm

Comfeel Beskyttelsesfilm er beregnet til at påføre områder, som ofte kommer i kontakt med kropsssekreter



som urin, tarmindhold eller sårsekret. Den er derfor primært beregnet til brug ved stomi-, inkontinens- og fistelpleje, men kan også bruges til f.eks. at beskytte huden under hudstrips i forbindelse med brystproteser. Filmen påsmøres den rengjorte hud og efterlader en tynd filmhinde på huden. På grund af filmens indhold af ethylacetat, kan det ikke anbefales at anvende filmen direkte på læderet hud, da dette kan give anledning til svie. Filmen er vandtæt, hvilket betyder, at aggressive kropsssekreter som urin og afføring forhindres i at komme i direkte kontakt med den sårbare hud. Samtidig tillader den vanddamp at passere fra huden og mindsker derved risikoen for maceration. Ved skift af hjælpemiddel med hudklæber (f.eks. stomiposer), vil det meste af filmen blive fjernet sammen med hudklæberen. Filmen tager dermed belastningen fra huden ved at fungere som en slags stødpude. Herefter lægges et nyt lag film på, før den nye hudplade sættes på. Ved skift fra én plastertype/hudklæber til en anden anbefales det at anvende beskyttelsesfilm i 6-8 uger.

Comfeel Beskyttelsesfilm fås både som en dab-on applikator og som éngangsservietter til f.eks. at have med i tasken.

Indholdsstoffer

Etoxy-ethyl methactylat polymer og Ethyl acetate.

Comfeel Rens

Comfeel Rens er en rensesvæske, som anvendes til afrensning af hud, der har været i kontakt med f.eks. urin og tarmindhold. Den er effektiv, men blid erstatning for vand og sæbe, når den sarte hud omkring en stomi eller hos inkontinente skal renses. Huden renses forsigtigt med **Comfeel Rens** på en blød klud eller en tot vat. Tør efter og lad huden tørre nogle minutter, inden den igen tildækkes. **Comfeel Rens** kan også bruges til at fjerne mindre mængder klæberester med, og den fås både som en 150 ml flaske og som éngangsservietter.



Indholdsstoffer

Miranol 2 MCAS modified, allantoin, isopropyl alcohol, parabens (phenonip), parfume og vand.

Comfeel Hudpleje og tilbehør produktsortiment

	Vare-nummer	Størrelse (cm)	Antal pr. æske
Comfeel Barriere	4720	60 ml	6
Comfeel Beskyttelsesfilm	4731	40 ml	6
Comfeel Beskyttelsesfilm	4735	Serviet	30
Comfeel Rens	4710	180 ml	6
Comfeel Rens	4715	Serviet	30



Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 49 11 12 13
Telefax 49 11 12 12
www.coloplast.dk