

Former perfekt. Hver gang.

Biatain® Silicone med 3DFit Technology former sig efter sårbunden, fylder hulrummet mellem sårbund og bandage, og reducerer ophobning af ekssudat for optimale sårhelingsbetingelser.

- Former sig efter sårbunden
- Absorberer vertikalt
- Låser ekssudatet inde

Biatain® Silicone




Biatain® Silicone

3DFit Technology fylder hulrummet og reducerer ophobning af eksudat



Former sig efter sårbunden

Ved kontakt med sårekssudat udvider og former skummen sig efter sårbunden og reducerer ophobning af eksudat.

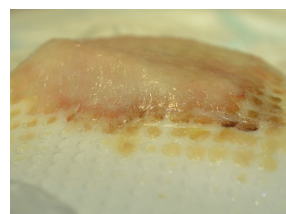


Absorberer vertikalt

Mikrokapillærene i skumstrukturen absorberer eksudatet vertikalt.

Låser eksudatet inde

Eksudatet holdes inde og retineres under kompression, således at risikoen for lækage og maceration af sårkanten og huden omkring såret reduceres.

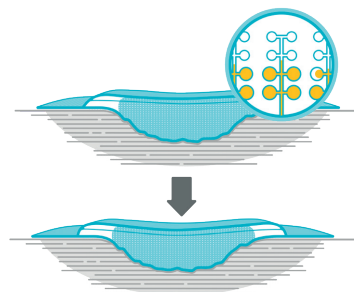

Produktopbygning

Biatain® Silicone er en blød og formbar polyurethan skumbandage, som består af en semi-permeabel bakterie- og vandtæt topfilm, et lock-away lag, et skumlag med 3DFit Technology, et blødt silikonekontaktlag på skumpuden og silikoneklæbekant samt 3-delt berøringfri påsættelsesfilm.

Anvendelse

Biatain Silicone anvendes til en lang række let til kraftigt væskende kroniske og akutte sår. Det omfatter bensår, tryksår, ikke-inficerede diabetiske fodsår, donorsteder, postoperative sår og hudafskrabninger. Biatain Silicone kan anvendes under kompression og kan sidde på i op til 7 dage.

Biatain Silicone



Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
33434	7,5x7,5	4,5x4,5	10
33435	10x10	6,5x6,5	10
33436	12,5x12,5	8,5x8,5	10
33437	15x15	10x10	5
33438	17,5x17,5	13x13	5
33400	10x20	5,5x15,5	5
33401	10x30	5,5x25,5	5

Biatain Silicone Multishape



Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
33408	14x19,5	7,5x12,1	5

Biatain Silicone Sakral



Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
33404	15x19	10,9x14	5
33405	25x25	17x17,2	5

Biatain Silicone Hæl



Varenr.	Str. i cm	Pudestr. i cm	Antal i æske
33406	18x18	14x13,2	5