


SenSura



SenSura 2-lags klæbere

- Standard
- Xpro



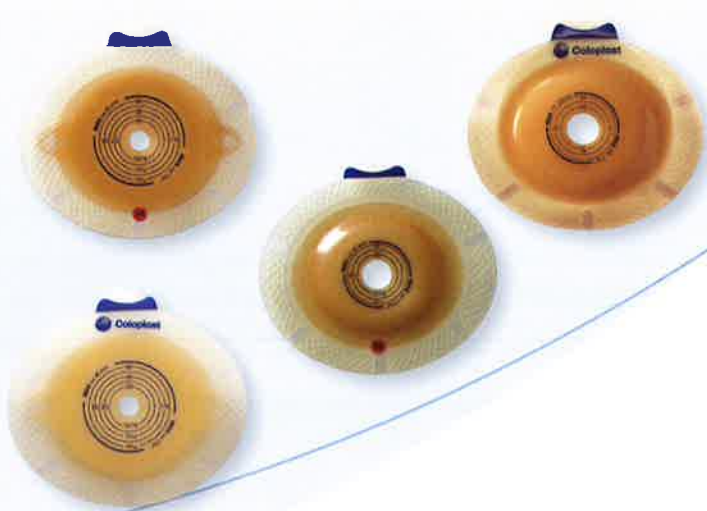

SenSura



Coloplast har lyttet til de input, som vi har modtaget fra stomisygeplejersker og brugere og udviklet to klæbere:

- **SenSura Standard**
- **SenSura Xpro**

SenSura klæberne

SenSura Standard klæberen kombinerer de vigtige egenskaber, som normalt er uforenelige:

1. **Hurtig vedhæftning og klæbeeve**
2. **Fleksibilitet**
3. **Absorption**
4. **Udvaskningsresistens**
5. **Let aftagelighed**

Ovennævnte fem parametre er umulige at kombinere i et enkelt klæberlag. I teorien vil en stærk klæber være vanskelig at fjerne, mens en klæber, der suger meget, vil blive blød, usammenhængende og opløst. Et klassisk klæberdilemma.

SenSura Standard klæberen

SenSura Standard klæberen har en optimal balance mellem stærke og klæbrige polymerer.

Centerlaget har en høj absorptions-eve, og det udvaskningsresistente toplag udsætter opløsningen af klæberen.

Det patenterede klæbermix gør, at klæberen kan fjernes i ét stykke og således stort set ikke efterlader klæberrester.



SenSura Xpro klæberen

SenSura Xpro klæberen er videreudviklet på **SenSura 2-lags** klæberen og har således de samme egenskaber, men klæbersammensætningen og -strukturen er optimeret til aggressivt output.



SenSura Xpro klæberen er mere udvaskningsresistent end **SenSura Standard**, hvilket betyder, at klæberen forbliver intakt, når den udsættes for aggressivt output. Derved beskyttes huden mod det aggressive output, hvilket betyder, at risikoen for hudirritationer og hudlidelser minimeres.

SenSura klæberne og systemerne

SenSura 1-dels systemerne fås med **SenSura Standard** klæberen.



Til **SenSura 2-dels** systemerne kan du vælge mellem

- **SenSura Standard** klæber
- **SenSura Xpro** klæber

Begge klæbere, såvel **SenSura Standard** som **SenSura Xpro**, fås både med og uden Convex Light.



Coloplast Danmark A/S
Møllevvej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213

www.coloplast.dk